



**NeoBulle®**  
Une marque d'amour

# GUIDE D'UTILISATION

## MASQUE GRAND PUBLIC CAT. 1

TAILLE ADULTE



**FILTRANT ET RESPIRANT**

Testé par la DGA en cat. 1

**CONFORT ET RÉSISTANCE**

100% coton BIO, fabriqué en tissu habituellement utilisé pour nos porte-bébés.

**FABRICATION FRANÇAISE**

Tissé et confectionné dans notre ateliers de la Loire (42).

*Masque barrière respectant le cahier des charges  
AFNOR S76-001*

**HAUTE PROTECTION\*\***

PERFORMANCES après 10 lavages	MASQUE CAT.1	RÉSULTATS MASQUE NÉOBULLE
Efficacité de filtration des particules de 3µm	> 90%	98%
Efficacité de filtration des particules de 1µm	Non défini	99%
Respirabilité	> 96 Lm-2.s-1	117 Lm-2.s-1



**FABRICANT FRANÇAIS**  
de porte-bébés et de soins bio,  
Néobulle s'engage aujourd'hui pour  
protéger la population à travers la  
**FABRICATION DE MASQUES BARRIÈRES.**

# MASQUE GRAND PUBLIC

## CAT.1 - UNS1

### AVERTISSEMENT

Pour protéger votre santé et celle des autres, il est très important de respecter cette notice d'utilisation.

Ce masque est un masque grand public, adapté pour les professionnels en contact régulier avec le public. Il est exclusivement réservé à des usages non sanitaires (UNS). Il est destiné à prévenir les projections de gouttelettes.

Ce masque ne remplace pas les gestes barrières (lavage régulier des mains, distanciation physique, réduction des contacts avec d'autres personnes). Il ajoute une barrière physique, à utiliser notamment lorsque vous êtes en contact étroit avec d'autres personnes hors du foyer.

**Le temps de port du masque est limité à 4 heures.**

Malgré tout le soin apporté à la fabrication de ces masques, il appartient au seul utilisateur, et en aucun cas au fabricant ou au fournisseur, de s'assurer de l'adéquation du masque avec les caractéristiques du milieu d'usage. Il convient de suivre scrupuleusement les recommandations et modalités d'usage décrites.

**ATTENTION :** si vous êtes malade, ce masque n'est pas adapté. Demandez l'avis de votre médecin.

Stockage : masques non utilisés à stocker dans un endroit propre, sec et à l'abri de la lumière.

\*\* Protocole d'essais décrit dans le document DGA du 25 mars 2020 - Masque catégorie 1 - Matériau dont les performances ont été mesurées par les laboratoires de DGA Maîtrise NRBC, 5 rue Lavastrier, 91710 Verle-Petit (rapport RP/20-2878/DGA\_MNRBC/2000305/NP) et qui supporte 10 lavages (rapport RP/20-3340/DGA\_MNRBC/2000305/NP)

# 1

## COMMENT PORTER VOTRE MASQUE?

Nos masques sont fabriqués avec le tissu de nos porte-bébés donc très résistant.

Ce tissu supporte bien les lavages. L'altération, après de multiples lavages, pourra donc venir des élastiques.

Avant de mettre un masque : se laver les mains à l'eau et au savon ou avec une solution hydro-alcoolique.

1 - Tenir le masque barrière par les élastiques et passer les élastiques de part et d'autre des oreilles.

2 - Placer le masque barrière sur le visage de manière à recouvrir le nez, la bouche et le menton.

3- Vérifier que le masque barrière soit correctement mis en place.



- Lorsque que l'on porte un masque : Eviter de toucher le masque. Ne pas déplacer le masque ou le porter sur le menton ou la tête pour parler.

- Chaque fois que l'on touche un masque usagé, se laver les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'une solution hydroalcoolique.

- Lorsqu'il s'humidifie ou qu'il devient difficile de respirer ou s'il est déformé, le remplacer par un autre masque.

# 2

## ASTUCES CONFORT

1 - Si les élastiques sont trop grands raccourcissez-les à l'aide d'un élastique à cheveux ou d'un point de couture. 2 - Si les élastiques tirent derrière les oreilles, accrochez un ruban de chaque côté et nouez le ruban derrière la tête.



# 3

# 4

## COMMENT RETIRER VOTRE MASQUE?

1-Ne pas toucher le devant du masque et l'enlever uniquement par les élastiques.



2 - Après utilisation, le masque doit être isolé pour être lavé. Il est recommandé d'isoler le masque dans un sac plastique à jeter après usage ou dans un sac réutilisable à laver.

3 - Se laver les mains avec de l'eau et au savon ou à l'aide d'une solution hydroalcoolique.

4 - Laver en machine à 60°C avec de la lessive et sans adoucissant. Vous pouvez le mettre en machine avec votre linge. Bien faire sécher le masque. Séchage au sèche-linge recommandé et repassage à la vapeur.

**ATELIER BULLE SAS**  
12 Boulevard des Chauchères  
42380 St Bonnet-le-Château - Loire  
Tél : 04.77.50.88.27 - neobulle.fr